

Bruksanvisning

Emgality 120 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

galkanezumab

För subkutant bruk



Innan du använder den förfyllda pennen:


Viktig information

- Din läkare eller sjuksköterska ska visa dig hur du förbereder Emgality och ger injektionen med injektionspennan. Injicera inte på dig själv eller någon annan förrän du har blivit visad hur man gör.
- Spara denna bruksanvisning och läs den vid behov.
- Injektionspennorna är **ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK**. Låt inte någon annan använda dem och återvänd dem inte. Om du gör det kan du sprida eller få en infektion.
- Injektionspennan innehåller delar som är av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny penna till injektionen.
- Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos. Du kan också läsa avsnittet ”**Välj injektionsställe**” i denna bruksanvisning för att lättare välja vilket område som fungerar bäst för dig.
- Om du har syn- eller hörselproblem ska du **inte** använda pennan utan hjälp från en vårdare.

BRUKSANVISNING

Innan du använder EMGALITY injektionspenna ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg-anvisningarna.

Emgality-pennans delar

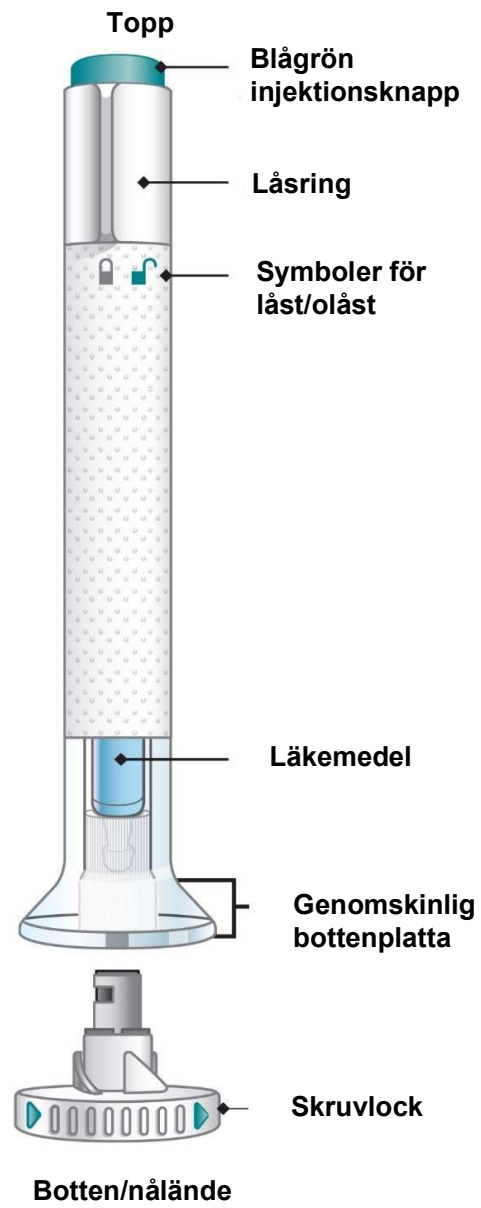

Innan du börjar

Ta ut pennan ur kylskåpet

Lägg tillbaka förpackningen med oanvända pennor i kylskåpet.

Låt skruvlocket sitta kvar tills du är redo att ge injektionen.

Pennan får **inte** skakas.

Låt pennan ligga framme i rumstemperatur i 30 minuter före injektionen för en behagligare injektion.

Pennan får **inte** värmas i mikrovågsugn, sköljas i varmvatten eller placeras i direkt solljus.


Kontrollera pennan och läkemedlet

Kontrollera att du har rätt läkemedel. Läkemedlet i pennan ska vara genomskinligt. Det kan vara färglöst eller svagt gult.

Använd **inte** pennan utan kasta den enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar om:

- den verkar vara skadad
- läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller små partiklar
- utgångsdatum som står på etiketten har passerat
- läkemedlet är fryst.


Utgångsdatum

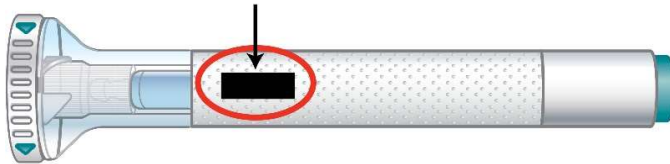

Förbered injektionen

Tvätta händerna med tvål och vatten innan du injicerar Emgality. Se till att du har en behållare för riskavfall i närheten.

Välj injektionsställe

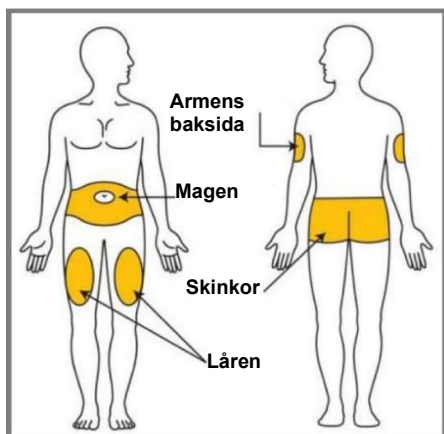

Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig att välja det injektionsställe som passar dig bäst.

- **Du** kan injicera läkemedlet i magområdet (buken) eller låret. Injicera inte närmare naveln än 5 centimeter.
- **En annan person** kan ge dig injektionen på överarmens utsida eller på skinkan.


Injicera **INTE** på precis samma ställe varje gång. Om du t.ex. gav den första injektionen i magen kan du ge nästa i ett annat område av magen.

- **Tvätta och torka injektionsstället innan du injicerar.**

1 Ta av skruvlocket från pennan

 **Kontrollera att pennan är låst. Låt skruvlocket sitta kvar tills du är redo att ge injektionen.**


- När du är redo att injicera vrider du av skruvlocket längst ner och kastar det i soporna.
- Sätt **inte** på skruvlocket igen – det kan skada nålen.
- Rör **inte** nålen.

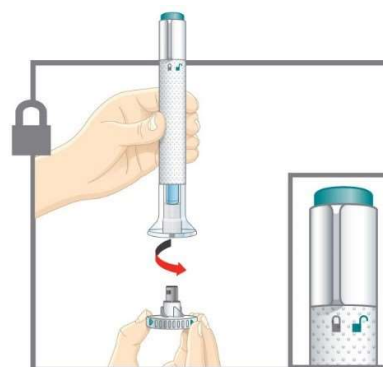

2 Placera och lås upp



- Placera och håll den genomskinliga bottenplattan plant och stadigt mot huden.

 Vrid låsringen till den **olåsta** positionen.

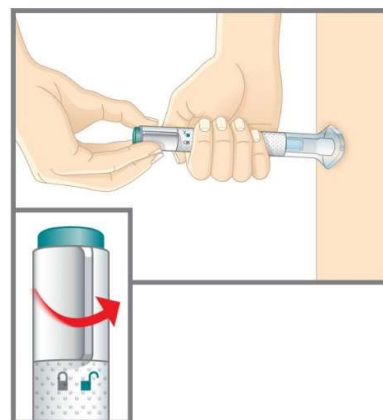

3 Tryck in och håll kvar

- Tryck in och håll kvar den blågröna injektionsknappen. Du hör ett ljudligt klick.
- **Fortsätt hålla den genomskinliga basplattan stadigt mot huden.** Du hör ytterligare ett klick cirka 5–10 sekunder efter det första. När du hör det andra klicket är injektionen klar.
- Ta bort pennan från huden.

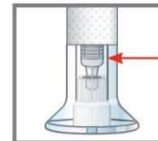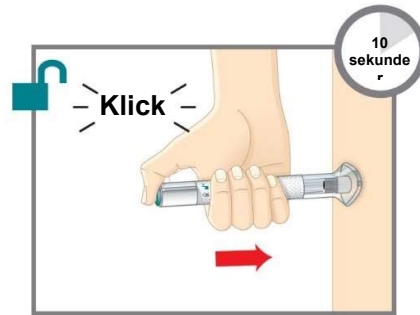

Du vet att injektionen är klar när du ser den grå kolven.

När du har injicerat läkemedlet

Kasta pennan

Sätt **INTE** tillbaka skruvlocket. Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.



När du kastar injektionspennan och behållaren för vassa föremål:

- Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
- Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Vanliga frågor

- F. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i pennan?**
- S.** Det är normalt att det finns luftbubblor i den förfyllda pennan. Emgality ges som en injektion under huden (subkutan injektion).
- F. Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålens spets när jag tar bort skruvlocket?**
- S.** En vätskedroppe på nålspetsen har ingen betydelse.
- F. Vad ska jag göra om jag låste upp pennan och tryckte på den blågröna injektionsknappen innan jag vred av skruvlocket?**

- S. Ta inte av skruvlocket. Kasta pennan och ta en ny.
- F. Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?**
- S. Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla pennan stadigt och bestämt mot huden.
- F. Vad ska jag göra om nålen inte drogs in efter injektionen?**
- S. Rör inte vid nålen och sätt inte tillbaka skruvlocket. Förvara den på säker plats så att ingen sticker sig på den. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska för att få anvisningar om hur du ska lämna tillbaka pennan.
- F. Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?**
- S. Detta är normalt. Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnugga inte på injektionsstället.
- F. Jag hörde fler än 2 klick under injektionen – 2 höga klick och ett lite lägre. Fick jag hela injektionen?**
- S. Ibland kan man höra ett lite lägre klick strax före det andra höga klicket. Det hör till pennans normala funktion. Ta inte bort pennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.
- F. Hur vet jag om injektionen är klar?**
- S. När du tryckt in den blågröna injektionsknappen hör du två höga klick. Efter det andra klicket vet du att injektionen är klar. Den grå kolven syns då också överst i den genomskinliga bottendelen.

Läs hela bipacksedeln till Emgality som finns i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

Denna bruksanvisning ändrades senast 26 mars 2020