


Bruksanvisning

Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

ixekizumab

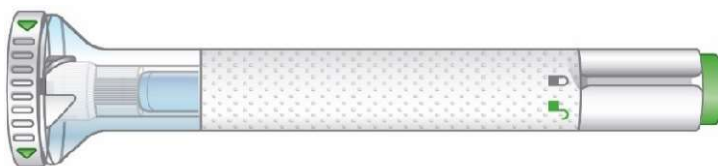

Innan du använder den förfyllda pennan:


Viktigt att veta

- Innan du använder Taltz förfylld injektionspenna ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg-anvisningar. Spara bruksanvisningen och läs den vid behov.
- Den förfyllda injektionspennan innehåller 1 dos Taltz. Den förfyllda injektionspennan är **ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK**.
- Den förfyllda injektionspennan får inte skakas.
- Den förfyllda injektionspennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny förfylld penna till injektionen.
- Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig bestämma var på kroppen du ska injicera din dos.
- Läs bipacksedeln till Taltz som medföljer i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.

BRUKSANVISNING

Innan du använder Taltz förfylld injektionspenna ska du noga läsa igenom och följa alla steg-för-steg-anvisningar.

Pennans delar

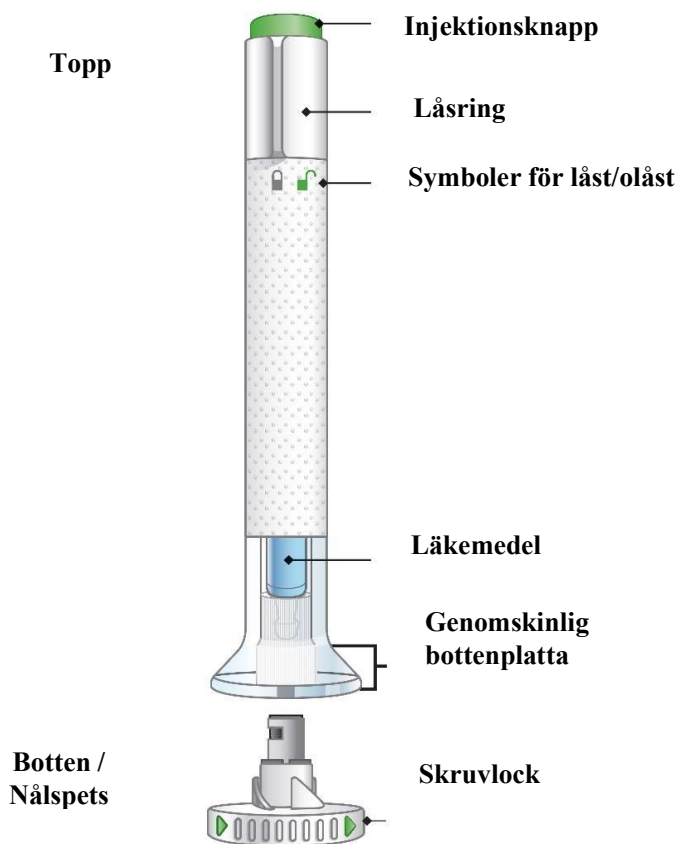

1 FÖRBEREDELSE

- 1a** Ta ut den förfyllda injektionspennan ur kylskåpet. Låt skruvlocket vara på tills du är redo att injicera. **Vänta 30 minuter** för att låta den förfyllda pennan anta rumstemperatur innan du använder den.


Använd **INTE** någon annan värmekälla för att värma upp läkemedlet, såsom mikrovågsugn, varmt vatten eller direkt solljus.



- 1b** Samla ihop det du behöver för injektionen:

- 1 sprittork
- 1 bomullstuss eller en kompress
- 1 behållare för vassa föremål att kasta den förfyllda pennan i

1c

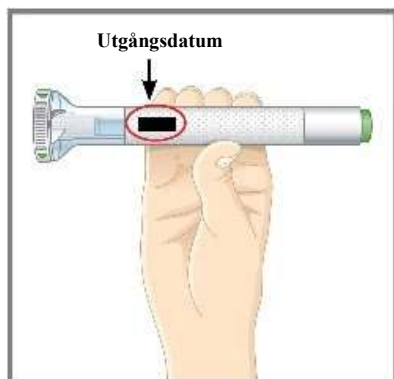

Kontrollera den förfyllda injektionspennan. Läs på etiketten. Kontrollera att du ser namnet Taltz på etiketten.


Läkemedlet i pennan ska vara genomskinligt. Färgen kan variera från färglös till svagt gul.

Om du ser något av det följande ska du **INTE ANVÄNDA** den förfyllda pennan utan kasta den enligt anvisningarna:

- Utgångsdatum har passerats.
- Pennan ser skadad ut.
- Läkemedlet är grumligt, tydligt brunt eller innehåller små partiklar.

1d Tvätta händerna innan du injicerar läkemedlet.

1e

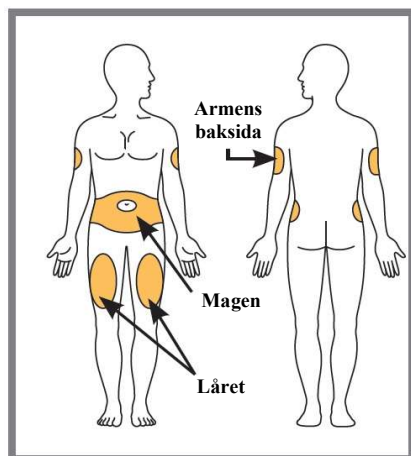

Välj injektionsställe.

Du kan ge injektionen i magen, låret eller överarmens baksida. Om du ska injicera i armen måste någon hjälpa dig.


Injicera **INTE** i områden där huden är ömtålig, skadad, rodnad eller hård eller där du har ärr eller bristningar. Injicera **INTE** inom 2,5 centimeter från naveln.

Skifta injektionsställe. Injicera **INTE** på precis samma plats varje gång. Om din sista injektion t.ex. var i vänster lår, ska nästa injektion vara i höger lår, magen eller baksidan av ena armen.

1f Förbered huden. Rengör huden med en sprittork. Låt injektionsstället lufttorka innan du injicerar läkemedlet.

2 INJICERA

2a

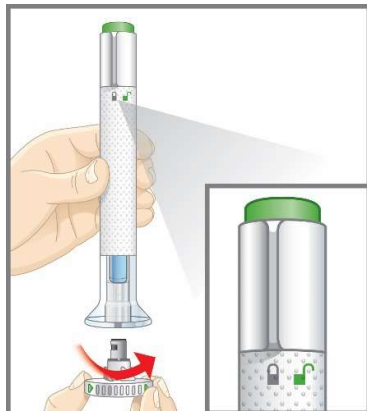


Kontrollera att låsringen är i låst läge.

Lämna skruvlocket vid pennans botten på tills du är redo att ge injektionen. Rör **INTE** vid nålen.

Vrid av skruvlocket.


Kasta skruvlocket i skräpkorgen. Du ska inte sätta tillbaka locket – om du gör det kan nålen skadas eller du kan skada dig själv av misstag.

2b

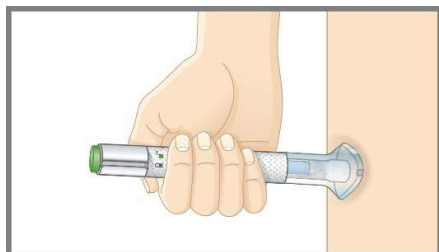


Placera den genomskinliga bottenplattan plant och stadigt mot huden.

2c

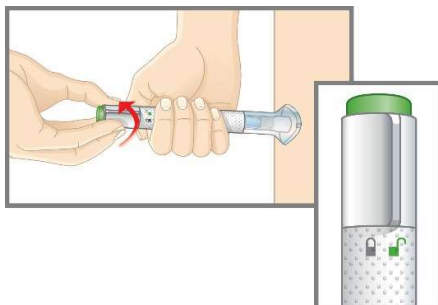

Håll bottenplattan mot låret och vrid låsringen till det olåsta läget. Nu är du redo att ge injektionen.

2d

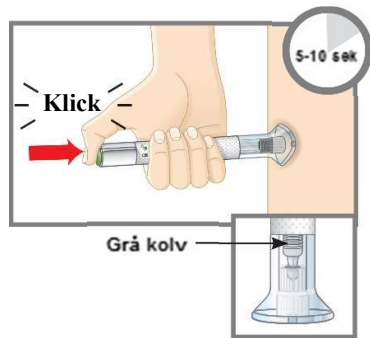

Tryck på den gröna injektionsknappen. Det hörs ett ljudligt klick.

Håll kvar den genomskinliga bottenplattan mot huden. Du hör ytterligare ett ljudligt klick cirka 5-10 sekunder efter det första. **Det andra klicket betyder att injektionen är färdig.**

Den grå kolven syns då också överst i den genomskinliga bottendelen.

Ta bort den förfyllda pennan från huden.

Tryck en bomullstuss eller en kompressmot injektionsstället. Gnid **INTE** på injektionsstället, det kan göra att du får ett blåmärke. Det kan komma lite blod. Detta är normalt.

3 AVSLUTA

3a



Kasta den förfyllda injektionspennan.

Sätt **INTE** tillbaka skruvlocket. Kasta den förfyllda pennan i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.

När du kastar den förfyllda injektionspennan och behållaren för vassa föremål:

- Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.
- Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
- Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.

Säkerhetstips

- Om du har frågor eller behöver hjälp med den förfyllda pennan, kontakta läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan.
- Om du har problem med synen ska du INTE använda den förfyllda pennan utan hjälp från en person som har fått lära sig hur den ska användas.
- Förvara den förfyllda pennan utom syn- och räckhåll för barn.
- Om du inte har någon behållare för vassa föremål, fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan var du kan få tag i en.

Vanliga frågor

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i den förfyllda injektionspennan?

Svar: Det är normalt att det finns luftbubblor i den förfyllda pennan. Taltz ges som en injektion under huden (subkutan injektion). Vid sådana injektioner är luftbubblor inget problem. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort skruvlocket?

Svar: En vätskedroppe på nålspetsen är inget problem. Den kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

Fråga: Vad ska jag göra om jag låste upp den förfyllda pennan och tryckte på den gröna injektionsknappen innan jag vred av skruvlocket?

Svar: Ta inte bort skruvlocket. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Fråga: Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är färdig?

Svar: Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla den förfyllda pennan stilla och stadigt mot huden.

Fråga: Vad ska jag göra om nålen inte drogs in efter injektionen?

Svar: Rör inte vid nålen och sätt inte tillbaka skruvlocket. Kasta den förfyllda pennan i en förslutningsbar och punktionssäker behållare för vassa föremål. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Fråga: Jag hörde mer än 2 klick under injektionen – 2 ljudliga klick och ett lite lägre. Vad betyder det? Fick jag hela injektionen?

Svar: En del patienter kan höra ett lite lägre klick strax före det andra ljudliga klicket. Det är normalt. Ta inte bort den förfyllda injektionspennan från huden förrän du hört det andra ljudliga klicket.

Fråga: Hur vet jag om injektionen är färdig?

Svar: När du tryckt in den gröna injektionsknappen hör du två ljudliga klick. Efter det andra klicket vet du att injektionen är färdig. Du ser då också den grå kolven i toppen av den genomskinliga bottendelen.

Fråga: Vad ska jag göra om den förfyllda sprutan har varit i rumstemperatur i mer än 30 minuter?

Svar: Vid behov kan sprutan förvaras utanför kylen (vid temperaturer som inte överstiger 30 °C) i upp till 5 dagar under förutsättning att den skyddas från direkt solljus. Taltz ska kasseras om det inte används inom 5-dagarsperioden i rumstemperatur.

Läs hela bruksanvisningen och bipacksedeln till Taltz som finns i kartongen om du vill veta mer om läkemedlet.