

Januari 2026

Information om Mounjaro® (tirzepatid) KwikPen®

Eli Lilly Sweden AB
Gustav III:s boulevard 42
Box 721, SE-169 27 Solna
Tel +46 (0)8 737 88 00
www.lilly.com/se


Bästa apotekspersonal,
Från januari 2026 kommer en modifierad version av Mounjaro KwikPen att distribueras till apotek. Pennan har modifierats för att minska volymen av kvarvarande läkemedel. Detta gör det tydligare att se när sista dosen är administrerad. Den modifierade versionen av Mounjaro KwikPen kommer att bli tillgänglig vid olika tidpunkter för de olika styrkorna. Detta innebär att den ursprungliga och den modifierade versionen av Mounjaro KwikPen kommer att distribueras parallellt under 2026. Produktens varunummer och förpackningens yttre är oförändrat, det går inte att se på förpackningen vilken version den innehåller. Pennan fungerar på samma sätt som den ursprungliga versionen av Mounjaro KwikPen, men det finns några uppdateringar:

1. **Kolvens position:** Kolven är placerad längre ner i ampullen jämfört med tidigare version.
2. **Förlängd kolv:** En ny del/komponent (se figur) har lagts till bakom kolven, vilket gör den längre.
3. **Kvarvarande läkemedel:** Efter den fjärde dosen har administrerats kommer kolven att vara nära botten på ampullen, vilket tydligt indikerar att pennan är redo att kasseras.

Kolvens placering - oanvänd KwikPen®-injektionspenna




Ursprunglig KwikPen®

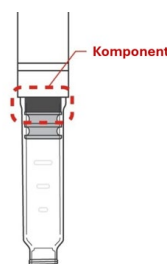


Modifierad KwikPen®

Kolvens ungefärliga position efter 4:e dosen

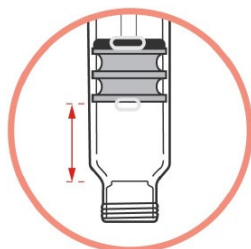

Ursprunglig KwikPen®

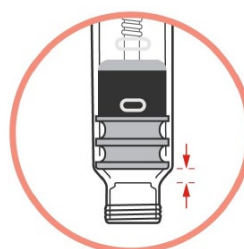

Modifierad KwikPen®

Positionen av kolven är relativ beroende på antal gjorda flödeskontroller.

Om du kontaktar Lilly är det viktigt att uppge batchnumret eftersom det gör det möjligt för oss att avgöra pennans version. Produktklagomål som visar att medicin motsvarande fyra doser har administrerats (pennan anses tom) kommer inte att kompenseras. Inte heller klagomål där pennan har använts felaktigt och inte enligt Lillys bruksanvisning kommer att kompenseras.

Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss via Lilly Medicinsk Information via e-post scan_medinfo@lilly.com eller telefonnummer 08-737 88 00.

Med vänliga hälsningar
Eli Lilly Sweden AB